

RAKENNE JA KOOSTUMUS

Tuote koostuu kolmikerroksisesta naamioista, nenäkiinnittimestä ja naamiovyöstä. Naamiossa on kolme kerrosta. Pinta- ja pohjakerrosten materiaali on polypropylene spunbonded non woven fabric. Keskikerroksen materiaali on polypropylene melt-blown non woven fabric. Nenäkiinnittimen materiaali on joustavaa polypropylene. Naamiovyön materiaali on polyester.

PUKEMISOHJEET

1. Pidä sininen puoli ulospäin.
2. Laita naamiovyö korvien taakse.
3. Muotoile nenäkiinnike nenäsi muotoiseksi painamalla sitä nenäluutasi vasten.
4. Vedä naamion alaosaa ja varmista, että se peittää sekä nenäsi että leukasi.
5. Hyvän istuvuuden varmistamiseksi säädä tarvittaessa.

VAROITUS!

1. Varmista että pakkaus on ehjä ennen avaamista. Käytä tuote ennen parasta ennenpäiväystä
2. Varmista, että nenäsi ja leukasi ovat naamion sisäpuolella halutun suojauksen saavuttamiseksi
3. Maski on kertakäyttöinen. Vaihda maski, jos se kastuu.
4. Henkilöiden, jotka ovat allergisia polypropylene spunbonded non woven fabric ei tule käyttää tätä tuotetta.
5. Käytä tuote mahdollisimman pian avaamisen jälkeen

SÄILYTYS JA KULJETUS

Suosittelaa säilytettäväksi kuivassa, ilmastoidussa, ja ei-syövyttävässä ympäristössä. Pidä kaukana sytytyksen lähteistä. Vältä kovaa kuormittamista, suoraa auringonvaloa sekä vesija lumisadetta kuljetuksen aikana.

KÄYTTÖTARKOITUS

Soveltuu hoitohenkilökunnan perussuojaimeksi ja muiden ruumiinnesteille ja roiskeille altistuville työntekijöille.

KÄYTTÖIKÄ 2 VUOTTA