

Luokka I:

## FI RAKENNE

Tuotteessa on kolme kerrosta. Kerrokset 1 ja 3 on valmistettu polypropeenikuitukankaasta (spunbond).

Kerros 2 (keskimmäinen kerros) on valmistettu polypropeenikuitukankaasta (melt-blown). Nenäpinne on valmistettu muotoiltavasta polypropeenista ja joustavat korvalenkit polyesteristä.

## KÄYTTÖOHJEET

1. Sininen puoli tulee aina ulospäin.
2. Kiinnitä maski korvalenkien avulla korvien taakse. Painele nenäpinne nenää vasten niin, että se muotoutuu nenän mukaan.
3. Vedä maskin alaosasta. Varmista, että maski peittää nenän ja leuan.
4. Asettele maski hyvin kasvoille.

## VAROITUS!

1. Varmista ennen käyttöä, että paketti on ehjä. Käytä tuote ennen viimeistä käyttöajankohtaa.
2. Varmista, että nenä ja leuka ovat aina maskin alla, jotta maski antaa parhaan mahdollisen suojan.
3. Maski on kertakäyttöinen. Maski on vaihdettava uuteen, jos se kastuu.
4. Tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, jotka ovat allergisia polypropeenikuitukankaalle (spunbond).
5. Käytä tuote mahdollisimman nopeasti pakkauksen avaamisen jälkeen.

## VARASTOINTI JA KULJETUS

Säilytetään kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ei saa säilyttää syövyttävässä ympäristössä.

Pidettävä loitolla tulesta ja tulenaroista aineista.

Kuljetuksen aikana tulee välttää kovaa kuormitusta, suoraa auringonvaloa sekä vesi- että lumisadetta.

## KÄYTTÖTARKOITUS

Suu-nenäsuojukset on tarkoitettu pääasiassa hoitohenkilökunnalle tai kuluttajakäyttöön.

SÄILYVYYS Kaksi vuotta